

FLEXVISC Plus

Supplemento Liquido Sinoviale

Contenuto:

Principio attivo: Sodio ialuronato 60 mg

Eccipienti: Disodio fosfato dodecaidrato, Sodio Diidrogeno fosfato diidrato, Sodio Cloruro, acqua sterile per iniezione q.s. a 3,0mL.
pH 6,8-7,8

Confezione: Siringa da 3,0 mL

Indicazioni:

Il prodotto è indicato per il trattamento intra-articolare del dolore da Osteoartrite (OA)

Utilizzo:

1. Il prodotto (1 siringa) viene usato per il trattamento dei pazienti affetti da osteoartrite (OA).
2. Il prodotto viene utilizzato per iniezione intra-articolare.
3. Il dosaggio e la frequenza del trattamento è di 6 mesi.
4. Il prodotto deve essere iniettato in articolazione con ago da 21-23G.
5. Il paziente non deve svolgere attività sportiva o fisica prima di 48 ore.

Efficacia terapeutica:

Il prodotto può contrastare le sollecitazioni meccaniche trasmesse dall'esterno.
Funge da barriera di protezione dell'articolazione.
Il prodotto può proteggere i tessuti sinoviali e promuovere la guarigione della cartilagine articolare.

Controindicazioni:

- Non somministrare a pazienti con ipersensibilità nota a preparati a base di ialuronato.
- Iniezioni intra-articolari sono controindicate in caso di infezioni pregresse e presenti alle articolazioni o malattie della cute circostante il sito di iniezione.

Precauzioni:

Il prodotto è destinato al solo uso intra-articolare. Non risterilizzare il prodotto o aggiungere ad altri prodotti. Uso SINGOLO.
Evitare iniezioni nei vasi sanguigni e nei tessuti circostanti.
Il medico deve considerare e valutare le cause in pazienti che hanno manifestato in passato reazioni allergiche ad altri farmaci e/o affetti da patologie epatiche.
Non utilizzare in caso di confezione aperta o danneggiata.
In caso di riutilizzo può causare infezioni o risposte infiammatorie.

Uso in gravidanza e allattamento:

Il prodotto può essere destinato all'uso in gravidanza, in considerazioni all'efficacia del trattamento rispetto ad eventuali eventi avversi.
Durante il periodo di trattamento, le madri devono interrompere l'allattamento.


Effetti collaterali:

Gli effetti collaterali principali possono essere dolore, gonfiore e rigidità nell'articolazione trattata.


Utilizzo:

FLEXVISC Plus è un supplemento liquido sinoviale. Si presenta in siringa di vetro contenente acido ialuronico.

1. Appoggiare le dita "sull'adattatore per dito" alla "flangia del serbatoio" della siringa.

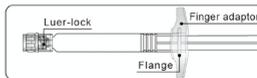

2. Tenere il sito "luer-lock" e svitare con attenzione il cappuccio della siringa (come mostrato di seguito). Non tenere il "serbatoio" della siringa durante lo smontaggio.

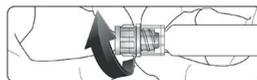

3. Continuare a tenere saldamente il sito del "luer-lock" e avvitare l'ago al "fermo della siringa" finché non viene fissato correttamente.

Nota!

Il prodotto è destinato esclusivamente per essere somministrato da personale autorizzato in conformità con la legge locale. Non forzare per evitare perdite del prodotto ed evitare deformazioni del punto di arresto che aumentano la forza di estrusione. La siringa, l'ago e qualsiasi altro materiale non utilizzato deve essere smaltito dopo l'uso. Non utilizzare in caso di confezione non integra. Prima dell'uso fare riferimento alle istruzioni.

Conservazione:

Come indicato sulla confezione, conservare a temperatura ambiente. Proteggere dai raggi solari e dal congelamento.

Durata di conservazione: 3 anni

SIMBOLO NEI PACKAGING

	Non riutilizzare		Non utilizzare il prodotto è danneggiato
	Temperatura controllata		Lotto
	Data di fabbricazione		Fabbricante
	Data di scadenza		Foglio illustrativo
	Sterile. Il contenuto della siringa è stato sterilizzato con metodo caldo-umido.		
	Marcatura CE, 2797 notificato dall'Ente.		

SciVision Biotech Inc.
9, 6e Rue Sud, K.E.P.Z.,
Kaohsiung 806, Taiwan

Distribuito da:
Farma Bio Technology srl
Via Brennero 139 - 38121
Trento (TN) - Italy